

오류 코드 및 기호:

표시 내용	의미	해결 방법
	배터리가 부족합니다 - 테스트하는 동안 화면에 배터리 기호가 남아 있는 경우.	즉시 배터리를 교체합니다.
	작동 온도 범위를 벗어났습니다.	측정기의 작동 범위인 5°C-45°C 내의 장소로 이동합니다. 20분 동안 측정기와 혈당측정스트립을 해당 장소에 보관하여 주변 온도에 적응이 된 후에 테스트를 수행합니다.
	혈당측정스트립에 묻은 혈액이 정확한 테스트를 하기에 충분하지 않습니다.	혈당측정스트립을 제거하고 새로운 혈당측정스트립을 사용하여 테스트를 반복합니다.

특허 및 관련 허가에 관한 정보는 다음을 참조하십시오.
www.patents.ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland



Ascensia, Ascensia Diabetes Care 로고, Clinilog, Contour (컨투어), Glucofacts 및 No Coding 로고는 Ascensia Diabetes Care Holdings AG 의 상표 및/또는 등록 상표입니다.

문제 해결 및 오류에 관한 정보를 포함한 자세한 지침은 사용 설명서를 참조하십시오.

표시 내용		의미	해결 방법
		이미 사용한 적이 있는 혈당측정스트립을 측정기에 삽입했습니다.	혈당측정스트립을 제거하고 새로운 혈당측정스트립을 사용하여 다시 테스트합니다. 화면에 혈액 방울이 감박일 때까지 기다린 후에 혈액 샘플을 묻습니다.
		혈당측정스트립이 제대로 삽입되지 않았습니다.	혈당측정스트립을 꺼낸 다음 다시 제대로 끼웁니다.
E5 E6 E8 E9	E10 E11 E12 E13	소프트웨어나 하드웨어에 문제가 있을 수 있습니다.	혈당측정스트립을 제거하고 새로운 혈당측정스트립을 사용하여 다시 테스트합니다. 문제가 지속되면 고객센터에 문의하십시오.

표시 내용	의미	해결 방법
	혈당측정스트립이 잘못되었습니다.	혈당측정스트립을 제거하고 CONTOUR®TS (컨투어®TS) 혈당측정스트립을 사용하여 다시 테스트합니다.
	테스트 결과가 "HI" (600 mg/dL 이상)입니다	• 손과 테스트 부위를 깨끗이 씻습니다. 새로운 혈당측정스트립을 사용하여 테스트를 반복합니다.
	테스트 결과가 "LO" (10 mg/dL 이하)입니다.	• 결과가 여전히 "HI" 또는 "LO" 로 나타나면 즉시 의사나 의료 전문가에게 문의하십시오.
주의: 혈당 수준이 250 mg/dL 이상이거나 50 mg/dL 이하이면 의학적으로 심각한 문제가 있을 수 있습니다.		



수입판매자 : 동국생명과학 주식회사
서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7 (대치동, 동국빌딩)
고객문의전화 : (82) 80-222-1357
www.diabetes.ascensia.com

©2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
모든 권리 보유.
90010010 Rev. 03/22

컨투어®TS

개인용혈당측정기



NO CODING®

체외진단의료기기

빠른 참조가이드

혈당 테스트를 실시하기 전에 사용 설명서와 랜싱 장치에 포함된 자세한 지침을 읽으십시오.

CONTOUR®TS (컨투어®TS) 측정기:



화면

단추 (스크롤)

M단추 (전원, 메모리, 설정)

주황색 혈당측정 스트립 포트

CONTOUR®TS (컨투어®TS) 혈당측정스트립:

점혈 부분: 혈액이 흡수되는 혈당측정 스트립의 끝입니다.



회색 전극 끝: 이 회색 끝을 위로 하여 측정기의 주황색 혈당측정스트립 포트에 삽입합니다.





- 
- 테스트 전후 또는 측정기, 랜싱 장치 또는 혈당측정스트립 취급 전후에 항상 비누와 물로 손을 잘 씻으십시오.
 - 키트에 제공된 랜싱 장치는 개인이 자가 검사를 위해 제작되었습니다. 감염의 위험이 있으므로 한 사람 이상이 사용해서는 안 됩니다.

혈당측정 스트립 삽입:

병에서 혈당측정스트립을 꺼낸 후 뚜껑을 잘 닫아서 보관합니다. **절대로 혈당측정스트립을 병 밖에서 보관하지 마십시오.**


회색 끝이 위로 오도록 혈당측정스트립을 잡고 주황색 혈당측정스트립 포트에 삽입합니다. 코드를 입력할 필요가 없습니다!

측정기에서 테스트할 준비가 되면 혈당측정스트립에 혈액 방울이 감박이는 것이 표시됩니다.

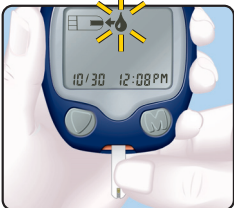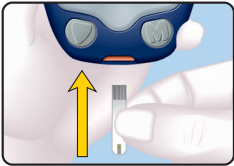


손끝 채혈:

랜싱 장치를 찌를 위치에 꼭 누르고 릴리스 단추를 누릅니다.

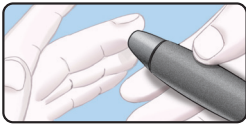

랜싱 장치 그림은 설명 목적에 한합니다.


혈액을 채취한 즉시 테스트합니다. 검사에 필요한 양은 0.6 µL 정도면 충분합니다.

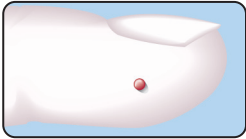

필요로 하는 실제 핏방울 크기

혈액 테스트:


주황색 혈당측정스트립이 아래로 가거나 귀하를 향하도록 측정기를 잡습니다. 핏방울에 즉시 혈당측정스트립 끝을 갖다 댑니다. 혈액이 혈당측정스트립의 끝에서부터 안쪽으로 흡수됩니다.

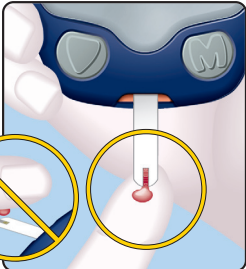

측정기에서 삐 소리가 나고 5초 카운트다운이 시작될 때까지 혈당측정스트립 끝을 핏방울에 대고 있습니다.



측정기를 끄려면, 혈당측정스트립을 제거하기만 하면 됩니다. 의료 폐기물로 또는 담당 전문 의료인의 권고에 따라 혈당측정스트립을 폐기하십시오.

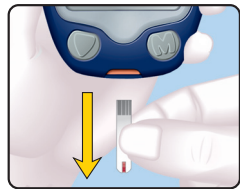



랜싱 장치에서 랜셋을 제거하려면, 랜싱 장치에 포함된 자세한 지침을 참조하십시오.

도움이 필요하십니까? 전화: (82) 80-222-1357
웹사이트: www.diabetes.ascensia.com